

KERNEL

Тележка KERNEL для компьютера

Руководство по эксплуатации



Тележка на колесах для системного блока, монитора и клавиатуры и принтера. Предназначена для размещения компьютера и принтера рядом с видеокольпоскопом. Позволяет легко перемещать компьютер по кабинету.

Комплект поставки:

Колёсико	4 шт.
Платформа	1 шт.
Опоры	2 шт.
Столешница	1 шт.
Проставка	1 шт.
Дверца	1 шт.
Уголок	4 шт.
Мышь	1 шт.
Винт М4х9	8 шт.
Винт М4х20	8 шт.
Саморез М5х12	16 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Инструкция-вкладыш по сборке	1 шт.

Характеристики:

Ячейка под системный блок, мм	480x180x408
Подставка под принтер, мм	340x340
Подставка под мышь, мм	170x185
Габаритные размеры, мм	630x944x720
Масса нетто: 14 кг	
Масса брутто: 16,5кг	

Порядок сборки:

1. Процесс сборки наглядно проиллюстрирован во вкладыше, прилагающемся в комплекте.
2. Закрепите колёсики на платформе при помощи саморезов М5х12, а так же опоры столешницы при помощи винтов М4х20.
3. Установите проставку в пазы между опорами. Закрепите уголки на опорах при помощи винтов М4х9.
4. Установите дверцу в паз в платформе.
5. Аккуратно установите столешницу на опоры, попав в пазы, и закрепите столешницу при помощи винтов М4х9.
6. Тележка собрана и готова к установке дополнительного оборудования.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем документе, при соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации Изделия составляет 12 месяцев с момента реализации при предоставлении товарной накладной, чека или иного документа, подтверждающего факт его приобретения.

В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт. В случае отсутствия возможности проведения ремонта производится замена Изделия. Гарантийный срок эксплуатации Изделия продлевается на время, в течение которого оно не использовалось по причине обнаруженных недостатков.

Гарантийные права пользователя признаются в течение указанного срока, при выполнении пользователем всех требований по транспортировке, хранению и эксплуатации Изделия.

Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:

- Если повреждение произошло по вине пользователя в процессе перевозки, установки или использования Изделия.
- Если повреждение произошло при разборке Изделия неавторизованным персоналом.
- При невозможности подтвердить факт покупки документально.
- При возникновении повреждения из-за несоблюдения требований безопасности, описанных в данном Руководстве по эксплуатации.
- Если повреждение возникло по причине стихийного бедствия или аварии.
- По истечению установленного срока гарантийного ремонта.

Организация, выполняющая гарантийное обслуживание

Уполномоченным представителем по гарантийному обслуживанию является компания:
ООО «НВ-Лаб».

Адрес: 107076, г. Москва, ул. Богородский вал, д. 3.

Website: www.nv-lab.ru

В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации, а также при обнаружении некомплектности Изделия при получении, просим Вас обращаться в Службу контроля качества организации ООО «НВ-Лаб».

Телефоны: +7 (495) 642 86 60 или 8 800 500 93 80.

Электронный адрес: service@nv-lab.ru