

Табурет для ванны модель FST5101

Руководство по эксплуатации



Содержание

1. Назначение, описание и область применения	3
2. Комплектация	3
3. Основные технические характеристики	4
4. Правила безопасности	4
5. Сборка и использование	4
6. Гарантийные обязательства.....	5
7. Организация, выполняющая гарантийное обслуживание	6

1. Назначение, описание и область применения

Табурет для ванны (далее - табурет) используется для проведения санитарно-гигиенических процедур детей, людей в преклонном возрасте и с ограниченными возможностями.

Подходит для ванн шириной от 40 см. Табурет не боится воды, контакта с моющими средствами и бытовой химией.

Особенности:

- Регулируемая высота ножек;
- Резиновые противоскользящие накладки на ножках;
- Ручки по бокам сиденья и выемки для установки лейки душа;
- Изогнутая форма сиденья;
- Дренажные отверстия для стока воды.

2. Комплектация

Сиденье	1 шт.
Опора сиденья с двумя регулируемыми ножками	2 шт.
Винт	5 шт.
Шайба	5 шт.
Ключ шестигранный угловой	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

3. Основные технические характеристики

Материал	Полиуретан, алюминий
Регулируемая высота табурета	37 – 55 см
Габаритные размеры сиденья	51x31 см
Максимальная нагрузка	100 кг
Вес брутто	1,9 кг
Габаритные размеры упаковки, ДхШхВ	650x350x90 мм

4. Правила безопасности


- Внимательно изучите настоящее Руководство по эксплуатации до начала использования табурета.
- Перед применением проверьте правильность сборки и устойчивость табурета.
- Проверьте высоту ножек: они должны быть одной высоты.
- Табурет не предназначен для купания грудных детей.
- Не позволяйте детям играть с табуретом, становиться на сиденье ногами, прыгать или менять высоту ножек.

5. Сборка и использование

Расположите опоры ножек с нижней стороны сиденья в специальные углубления. Зафиксируйте опоры винтами с шайбами, входящими в комплект поставки. Для регулировки по высоте необходимо на ножке утопить пружинную кнопку-фиксатор, вытянуть телескопическую трубку, после чего зафиксировать ножку кнопкой-фиксатором. Ножки должны быть зафиксированы

на одном уровне в соответствии с нумерацией на ножках.

Проверьте, чтобы кнопки-фиксаторы входили в отверстие целиком и прочно держали удлинители ножек.

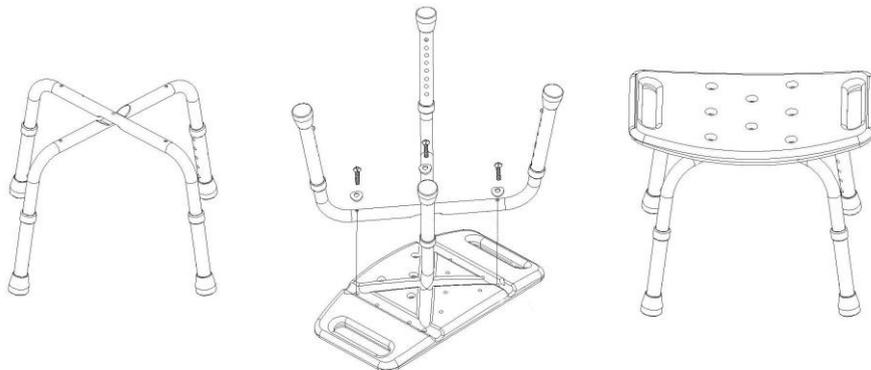

6. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие табурета техническим характеристикам, указанным в настоящем Руководстве по эксплуатации, при соблюдении пользователями условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации табурета составляет 12 месяцев с момента реализации в соответствии с документом, подтверждающим факт его приобретения.

Гарантийные права пользователя признаются в течение указанного срока при выполнении пользователем всех требований по транспортировке, хранению и эксплуатации Изделия.

7. Организация, выполняющая гарантийное обслуживание

Уполномоченным представителем по гарантийному обслуживанию является компания:

ООО «Экомедика».

Адрес: 107076, г. Москва, ул. Богородский вал, д. 3.

В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации, а также при обнаружении некомплектности Изделия при получении, просим Вас обращаться в Службу контроля качества организации ООО «Экомедика».

Телефоны: +7 (495) 642 86 60.

Электронный адрес: service@nv-lab.ru