

Табурет для ванны модель FST5104

Руководство по эксплуатации



Содержание

Правила безопасности	3
1. Назначение, описание и область применения	4
2. Комплектация	4
3. Основные технические характеристики	5
4. Сборка и использование	5
5. Гарантийные обязательства.....	7
6. Организация, выполняющая гарантийное обслуживание	8

Правила безопасности

- Внимательно изучите настоящее Руководство по эксплуатации до начала использования табурета.
- Перед применением проверьте правильность сборки и устойчивость табурета.
- Проверьте высоту ножек: они должны быть одной высоты.
- Табурет не предназначен для купания грудных детей.
- Не позволяйте детям играть с табуретом, становиться на сиденье ногами, прыгать или менять высоту ножек.

1. Назначение, описание и область применения

Табурет для ванны (далее - табурет) используется для проведения санитарно-гигиенических процедур людей в преклонном возрасте и с ограниченными возможностями, а также детей. Подходит для ванн шириной от 47 см. Табурет не боится воды, контакта с моющими средствами и бытовой химией.

Особенности:

- Регулируемая высота ножек;
- Резиновые противоскользящие накладки на ножках;
- Ручки по бокам сиденья и выемки для установки лейки душа;
- Дренажные отверстия для стока воды;
- Наличие спинки с возможностью легкого демонтажа.

2. Комплектация

Сиденье	1 шт.
Опора сиденья с двумя регулируемыми ножками	2 шт.
Спинка	1 шт.
Штанга крепления спинки	2 шт.
П-образное соединение для штанги крепления спинки	1 шт.
Винт крепления длиной 35 мм	6 шт.
Винт крепления длиной 60 мм	3 шт.
Шайба	9 шт.
Ключ шестигранный угловой	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

3. Основные технические характеристики

Материал	гигиенический пластик, алюминий с порошковым напылением
Регулируемая высота сиденья табурета	36 – 54 см
Габаритные размеры сиденья	50x31 см
Максимальная нагрузка	100 кг
Габаритные размеры табурета со спинкой, ДхШхВ	51 x 49 x (65 – 83) см
Габаритные размеры упаковки, не более, ДхШхВ	600 x 400 x 120 мм
Вес брутто	2,6 кг

4. Сборка и использование

Закрепите на спинке табурета две штанги крепления спинки с помощью четырех **винтов крепления длиной 35 мм** 1 (Рис.1).

Не заворачивайте их полностью.



Рисунок 1

Установите П-образное соединение на штанги крепления спинки таким образом, чтобы в круглые отверстия П-образного соединения попали пружинные кнопки-фиксаторы **2** (Рис. 1).

Далее, разместите сиденье на краю стола, выбранного для сборки табурета таким образом, чтобы стрелка **3** (Рис. 2) располагалась от себя.

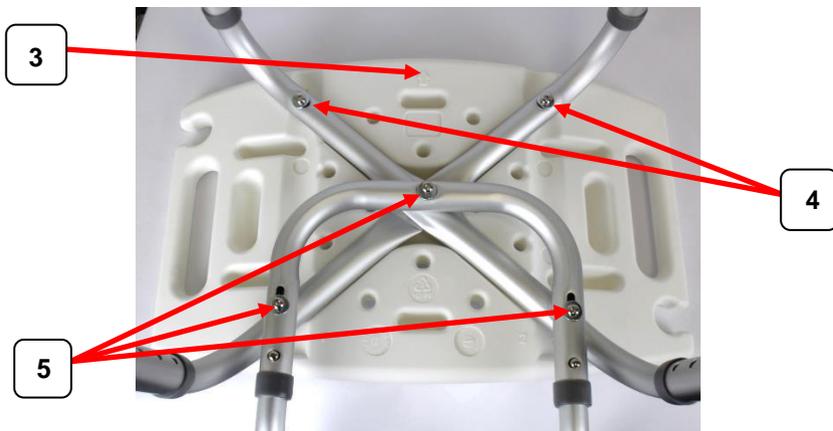


Рисунок 2

Расположите опоры ножек в специальные углубления на поверхности сиденья.

Предварительно установите в дальние отверстия без номеров два **винта крепления длиной 35 мм** **4** с шайбой (Рис. 2). Не заворачивайте их полностью.

Разместите над опорами ножек П-образное соединение, с закрепленной на штангах спинкой, и установите в центральное отверстие, а также в отверстиях №1 и № 2 сиденья три **винта крепления длиной 60 мм** **5** с шайбами, как показано на Рис 2.

Затяните до упора винты крепления спинки и сиденья.

Для регулировки по высоте необходимо на ножке утопить пружинную кнопку-фиксатор, вытянуть телескопическую трубку,

после чего зафиксировать ножку кнопкой-фиксатором.

Ножки должны быть зафиксированы на одном уровне в соответствии с нумерацией на ножках.

Проверьте, чтобы кнопки-фиксаторы входили в отверстие целиком и прочно держали удлинители ножек.

5. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем Руководстве по эксплуатации, при соблюдении пользователями условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации Изделия составляет 12 месяцев с момента реализации в соответствии с документом, подтверждающим факт его приобретения.

Гарантийные права пользователя признаются в течение указанного срока при выполнении пользователем всех требований по транспортировке, хранению и эксплуатации Изделия.

В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт. В случае отсутствия возможности проведения ремонта производится замена Изделия. Гарантийный срок эксплуатации Изделия продлевается на время, в течение которого оно не использовалось по причине обнаруженных недостатков.

Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:

- Если повреждение произошло по вине пользователя в процессе перевозки, хранения или эксплуатации Изделия.
- Если повреждение произошло при разборке Изделия неавторизованным персоналом.
- При невозможности подтверждения факта приобретения Изделия документально.

- При возникновении повреждения из-за несоблюдения требований, описанных в настоящем Руководстве по эксплуатации.
- При повреждении по причине стихийного бедствия или аварии.
- По истечению установленного срока гарантийных обязательств.

6. Организация, выполняющая гарантийное обслуживание

Уполномоченным представителем по гарантийному обслуживанию является компания:

ООО «Экомедика».

Адрес: 107076, г. Москва, ул. Богородский вал, д. 3.

В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации, а также при обнаружении некомплектности Изделия при получении, просим Вас обращаться в Службу контроля качества организации ООО «Экомедика».

Телефоны: +7 (495) 642 86 60.

Электронный адрес: service@nv-lab.ru